

Póliza de Garantía

Producto Modelo
.....
Marca No. de Serie

La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de el de del 20.....

COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V.
Poniente 128, No. 19, Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.

Tel. 55 3093 9090 y/o 800 087 0890

Términos y Condiciones

1. Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra; siendo responsabilidad exclusiva de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM sea el único que intervenga para efectuar dichas intervenciones; liberando al consumidor por costos de reparación y mano de obra siempre y cuando sea defecto de fabricación y no por mal uso.
2. El consumidor se obliga a entregar el equipo defectuoso, motivo de esta Póliza, el cual deberá estar completo y sin daños visibles.
3. Esta garantía ampara únicamente el producto arriba especificado.
4. Para hacer EFECTIVA esta garantía será necesario en todo caso, presentar esta garantía debidamente requisitada y sellada o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 126-A No.62 Col.Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM: Puebla: 13 Sur No. 1503, Col. Santiago, C.P. 72000, Puebla, Puebla, Guadalupe: Sierra Nevada No. 913, Col. Independencia, C.P.43440, Guadalupe, Jalisco y/o Monterrey: Celaya No. 305, Col. Mitras Centro, C.P. 64460, Monterrey Nuevo León, con líneas de atención al 800 087 0890.

5. Los accesorios, refacciones, componentes y/o consumibles podrán ser adquiridos en cualquiera de los domicilios que tiene Comercializadora Kelly, S.A. de C.V. como el Centro de Servicio Técnico ubicado en Poniente 126-A No.62 Col.Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM Puebla, Guadalupe o Monterrey con líneas de atención al 800 087 0890.

Situaciones No Cubiertas Por La Garantía

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
4. Cuando el producto hubiese sufrido algún daño por descarga eléctrica o variación de voltaje.
5. Desgaste natural de la mercancía.
6. Daños causados por agentes externos de carácter químico o electroquímico, así como invasión de cuerpos extraños como agua, arena, plagas, etc.
7. Productos que presenten el número de serie alterado o removido.
8. Gastos de envío u operación logística para llevar a cabo el proceso de garantía.
- 9.- Cuando el producto haya sido adquirido fuera de los canales legales de compra.

Nombre:

Firma:

Fecha de Entrega:



Sello de Validez



Silla de Ruedas Handy Suprema S400



Distribuido por
COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V.
Fuentes de Piramides No.1, Int.604,
Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes,
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
México (Domicilio Fiscal)

Servicio técnico:
HERGOM MATRIZ
Poniente 126 A No. 62 Col. Nueva Vallejo,
Del. Gustavo A. Madero, México D.F. C.P. 07750
Telefonos.: 3093 9090

Visite nuestra página en:
www.hergom-medical.com



Instructivo





3.4 Ajuste de ángulo del reposa pies

La silla S400 cuenta con un sistema de ajuste de altura para los reposapiés, para ajustarlos a una altura y ángulo que resulte confortable siga las siguientes indicaciones:

Para elevar el reposa piernas, colóquese al frente de la silla y simplemente jale la estructura del reposa piernas directamente hacia arriba con las manos para la posición apropiada; Para bajar el ángulo del reposa piernas, primero tome con una mano la palanca del bloqueo de posición y júlela hacia adelante, esto desbloqueará el mecanismo, en ocasiones requerirá subir un poco el reposapiés para lograr un desbloqueo completo de la posición, y una vez desbloqueado ajustar nuevamente a la posición deseada, finalmente suelte el mango de control para regresar al estado de auto bloqueo.

Capítulo 4. Mantenimiento y Garantía

4.1 Mantenimiento

1. Almacene la silla de ruedas en un lugar seco y ventilado, evite químicos corrosivos tales como aceite, ácido y álcalis.
2. Conserve la silla limpia. Usted puede limpiar su silla con un detergente neutro. Después de limpiar, por favor seque toda la estructura y adicione lubricante al soporte.
3. Las sillas deben evitar la exposición al sol y lluvia. Está estrictamente prohibido tomar un baño en la silla de ruedas. Después de humedecerse, seque la estructura a tiempo y adicione lubricante a la posición de soporte.
4. Esta silla de ruedas es de peso ligero. Está estrictamente prohibido practicar deportes como jugar y correr.
5. Siempre revise la presión de aire de las llantas neumáticas (opcional), ponga atención al desgaste de las llantas, y remplace si es necesario.
6. Los radios de accionamiento necesitan ser ajustados continuamente.
7. Se recomienda agregar dos o tres gotas de aceite de motor de alta calidad en el balero o soporte de las ruedas y a la rueda de la guía frontal cada mes.
8. Frecuentemente limpie los escombros del soporte de rueda (ejemplo cabello e hilos)
9. Siempre revise la sensibilidad de los frenos y ponga atención al asiento, verifique si el cojín del asiento está dañado para asegurar seguridad.

4.2 Regulación de garantía

La fábrica otorgará una garantía de un año a las sillas de rueda producidas en acuerdo con el uso normal de las instrucciones. El periodo de garantía inicia en la fecha de compra de la silla de ruedas.

Uso previsto

Este producto se utiliza como medio de transporte para personas discapacitadas, pacientes y ancianos y enfermos que tienen dificultades para moverse. La silla manual puede ser empujada por otros en la parte posterior, o el usuario puede empujar el volante de forma manual.

Datos técnicos:

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| Modelo | | FS903 |
| Dimensiones | Longitud total | 112cm |
| | Ancho total | 65 cm |
| | Altura total | 93 cm |
| Acho de Plegado | | 29 cm |
| Ancho del Asiento | | 46 cm |
| Profundidad del asiento | | 40 cm |
| Altura del asiento desde el suelo | | 50 cm |
| Altura del reposabrazos | | 24 cm |
| Distancia entre reposa brazos | | 46 cm |
| Altura del respaldo | | 44 cm |
| Altura del reposapiés desde el suelo | | 12 cm |
| Peso | | 19 kg |
| Capacidad máxima de carga | | 100 kg |
| Especificación de la llanta delantera | | 20 cm |
| Especificación de la llanta trasera | | 61 cm |

Capítulo 1. Descripción general

1.1 Buen rendimiento

Para una máxima estabilidad, los ejes de las ruedas traseras deben fijarse en la última posición. Cualquier cambio del eje afectará la estabilidad de la silla de ruedas en progreso. Si usted mueve el eje de la rueda trasera de la silla de ruedas hacia adelante, verifique si está estable antes de usar la silla de ruedas. Se debe verificar la estabilidad de la silla de ruedas antes de que el cojín del asiento de la silla de ruedas se incline al límite o el eje trasero sea reparado. Para garantizar la seguridad, se recomienda que los usuarios prueben cuidadosamente su estabilidad antes de usar el borde de la rueda.

1.2 Instrucciones de seguridad

•A menos que se especifique lo contrario, todos los ajustes de la silla de ruedas deben realizarse sin el usuario en ella. Cuando esté en la silla de ruedas, salga de esta antes

de realizar cualquier ajuste (por ejemplo, al frente, a los lados o detrás de la silla de ruedas)

- Antes de usar la silla de ruedas, verifique si los reposabrazos, las manijas, etc. , no están flojos.
- Cuide su silla de ruedas, especialmente en las pistas.
- No intente tomar objetos moviendo su cuerpo hacia adelante. No se doble sobre las rodillas para recoger objetos en el suelo.
- No cambie su postura cuando la silla se incline hacia atrás, de lo contrario la silla de ruedas se caerá.
- El dispositivo para el bloqueo de la rueda no es un dispositivo de freno, por lo tanto, no lo use para detener la silla de ruedas en movimiento.
- No suba o baje escalones o desniveles (banquetas, plataformas, etc.) sin ayuda.
- Las sillas de ruedas no debe subir o bajar en escaleras mecánicas, ya que pueden causar lesiones personales graves.
- Cuando el conductor desee bajar de la silla de ruedas a otra ubicación, primero estacione la silla de ruedas en la posición más cercana y óptima, y apunte la rueda delantera al lugar donde el conductor será transferido. Cuando baje de la silla de ruedas, verifique que las ruedas estén bloqueadas.
- Para mover la silla de ruedas, tómela siempre de las conexiones fijas de la silla de ruedas, no la parte activa, como los reposabrazos, los reposapiés, etc.
- No se pare en el marco de la silla de ruedas.
- No se pare sobre el reposapiés. Asegúrese de doblar el reposapiés o abatirlos hacia un lado.

Capítulo 2. Operación

2.1 Desplegar y plegar la silla de Ruedas




图1 展开轮椅

2.1.1 Método para desplegar la silla de ruedas

Presione los lados del cojín de la silla de ruedas verticalmente con la mano.

Deje la silla de ruedas completamente abierta para el uso normal, luego baje los reposapiés izquierdo y derecho a la posición de uso. (Ver Figura 1 a la izquierda)

图2 折叠轮椅

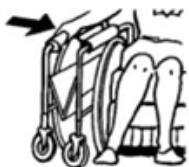

2.1.2 Plegado de la silla de ruedas

Primero gire los reposapiés a la posición vertical, luego tire manualmente del asiento de la silla de ruedas verticalmente hacia arriba desde el centro para plegar completamente la silla de ruedas al estado de no uso. (Ver imagen 2 a la izquierda)

2.2 Agacharse e inclinarse hacia atrás

Nota: No intente levantar un objeto en el suelo moviendo el cuerpo hacia adelante y no se doble sobre la rodilla para levantarlo.

2.2.1 Agacharse

Antes de moverse, ajuste la posición de la rueda delantera (las dos ruedas delanteras deben estar paralelas entre sí) y bloquee la rueda trasera (como se muestra a la derecha)



2.2.2 Inclinarse hacia atrás

Primero lleve la silla de ruedas a la posición más cercana y adecuada. Ajuste las ruedas delanteras para que la distancia entre los ejes del eje de las ruedas traseras alcance su valor máximo y pueda inclinarse hacia atrás sin modificar su postura sentado. No se incline hacia atrás sobre el punto más alto del respaldo, de lo contrario, el cambio en el centro de gravedad hará que la silla de ruedas se voltee. (Como se muestra a la derecha)

2.3 Subir escalones

Nota: nunca intente subir un escalón impulsando de frente la silla de ruedas contra el escalón, esto puede causar lesiones al usuario o causar daños a las ruedas delanteras invalidando así la garantía. Cuando se necesita subir la silla de ruedas por escalones o a una banqueta, alguien deberá empujar y conducir la silla tomándola por el manubrio detrás de la espalda. Al subir, el conductor detrás de la silla de ruedas deberá inclinar la silla de ruedas hacia atrás, levantando la rueda delantera a la altura del escalón, luego empujando un poco hacia adelante, bajando suavemente la silla hasta que la llanta delantera toque el plano del escalón, el conductor auxiliar luego debe empujar la silla de ruedas con fuerza para que la rueda trasera cruce el escalón y continúe conduciendo. (Como se muestra a la derecha).



Capítulo 3. Operación de funciones especiales

3.1 Descansa brazos desmontables

Para desmontar el descanso brazos, presione el botón o seguro de canica y muévalo fuera de la localización del agujero, una vez desbloqueado el seguro, jale el reposa brazos hacia arriba para desmontarlo. Para montar nuevamente el descanso brazos, solo alinee el orificio del montaje e insértelo. Sostenga el reposa brazos hasta que los seguros de canica salten en los agujeros del posicionamiento.

3.2 Reposapiés desmontables

Para instalar los reposapiés, primero alinee la posición inferior y superior de los agujeros del soporte de con el pin del posicionamiento en la estructura de la silla, una vez embonados gire suavemente el soporte del reposapiés desde el interior hasta el exterior hasta que pueda ajustar la placa de auto bloqueo en la parte trasera de la estructura.

Cuando desmonte el reposa pies, primero jale la palanca del seguro del soporte del reposapiés y entonces rote el soporte del reposapiés hacia fuera en un cierto ángulo, después levante para retirar el soporte de reposapiés del marco.



3.3 Ajuste del largo del reposa pies

Para ajustar el largo del reposa pies localice el tornillo en la base de los mismos y aflójelo para liberar la posición actual, una vez liberado ajuste a la longitud deseada y asegúrelo apretando el tornillo nuevamente.

